




Promedix PR-810

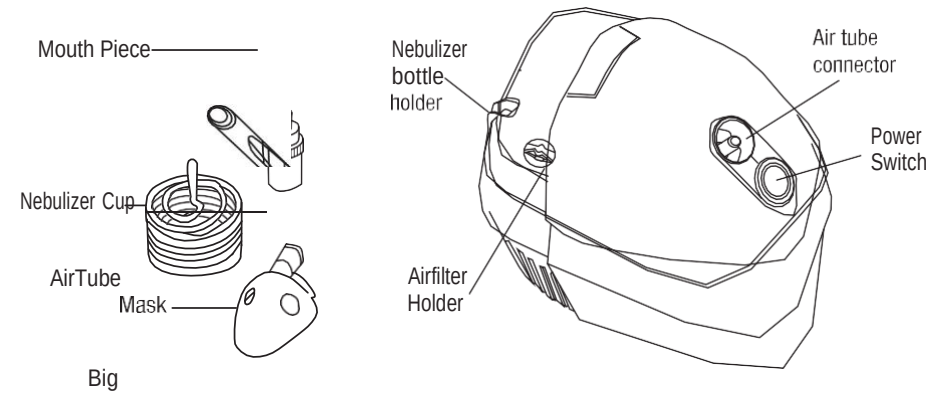

Porlasztó inhalátor

PR-810

Mi az a porlasztó?

Az orvosi légkompresszoros porlasztórendszer egy orvosi eszköz, amelyet arra terveztek, hogy az orvos által felírt gyógyszereket a tüdő légutakba juttassa. A porlasztó és a légkompresszor együttesen aeroszolos ködöt biztosít, amelyet a beteg kizárólag orvosi kezelés céljából inhalálhat.

Hogyan működik a porlasztó?

Ez a készülék kompakt, egyszerűen kezelhető és kényelmesen hordozható. A légnomás előállításához egy olajmentes, egyhengeres dugattyús szivattyút használ. A levegő a légszűrőn keresztül áramlik a permetpumpáló légkompresszor egységébe, a fúvóakivezető nyíláson keresztül, majd a permetpumpálón keresztül. A fő levegő áramlása a légkompresszor egységbe és onnan kifelé.

A doboz tartalma: 1x porlasztó kompresszor 1x levegő cső 1x szájrész
1x felnőt mask 1x gyermek mask 1x gyógyszeres csésze 5 x légszűrő

Alkatrészek: A standard porlasztó alkatrészei az alábbi ábrán láthatók

Hogyan helyezem be a gyógyszert a porlasztóba? A gyógyszer beillesztéséhez a porlasztóba a következőket kell tennie: 1. Nyissa ki a kupakot (lásd az ábrát). 2.

Töltse meg a poharat az előírt gyógyszerrel

Ügyeljen arra, hogy a gyógyszer ne haladja meg a 6 ml-es folyékony oldali határt.

Zárja le a kupakot. 4. Csatlakoztassa a szájkosarat/maszkot.

Megjegyzés: A szájrész csak szájon át történő belégzéshez használható.

Hogyan kezeljem a porlasztót?

www.gravicom.hu

A porlasztó működtetéséhez tegye a következőket:

1. Csatlakoztassa a légkompresszort, de ne csatlakoztassa a porlasztót.
2. Győződjön meg róla, hogy a légszűrő a légkompresszorhoz van csatlakoztatva.
3. Kapcsolja be a hálózati kapcsolót.
4. Miután a légkompresszor lefutott megfelelően 1-2 percig, csatlakoztassa a légkompresszor fűvókakivezetését a levegőcsővel a porlasztó bemenetéhez.
5. Kezdje meg a kezelést az orvos utasításai szerint.
6. Lélegezzen be és lélegezzen ki. Ügyeljen arra, hogy a gyógyszeres kezelés végezetével ne inhaláljon tovább.
7. Ha befejezte a használatot, kapcsolja ki a légkompresszor egységet, mielőtt lecsatlakoztatja a légtömlőt.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja gyúlékony tárgyak közelében vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.

Mit tegyek, miután használtam a porlasztót?

Annak érdekében, hogy a porlasztója megfelelően működjön, minden használat után tegye meg a következőket:

1. Miután kihúzta a légtömlőt, húzza ki a szájrészt/maszkot
2. Nyissa ki a kupakot, és ürítse ki a csészét. Mossa ki a porlasztót folyó vízzel vagy áztassa meleg vízben 15 percig. Az alaposabb, higiénikusabb tisztítás érdekében adjon a vízhez egy kis ecetet.
3. Tárolás előtt teljesen szárítsa meg a porlasztót.

MEGJEGYZÉS: Ne forralja fel a porlasztóban lévő vizet. Ez károsíthatja azt.

Mikor kell kicserélni a légszűrőt?

Általában a légszűrőt háromhavonta vagy 300 használat után kell cserélni.

A légszűrő cseréje:

1. Vegye le a szűrőfedelelet.
2. Cserélje ki a szűrőt.
3. Illessze vissza a szűrőfedelelet.

Megjegyzés: Ha a szűrő nedves lesz, használat előtt hagyja teljesen megszáradni.

Milyen karbantartást és tárolást igényel a porlasztó? www.gravicom.hu

1. A porlasztót mindig óvatosan kezelje.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, ha nem használja.
3. Tartsa a porlasztót gyermekek számára elérhetetlen helyen.
4. Ha a porlasztót tárolja, ne hajlítsa meg a légtömlőt.

Hibaelhárítási útmutató.

Túl nagy zaj: Nincs szűrő a készülékben: Tegyen szűrőt a készülékbe
A porlasztó nem működik:

- A kompresszor kapcsoló ki van kapcsolva: Kapcsolja be a készüléket.
- A porlasztót nem tisztították meg az előző használat után: Tisztítsa meg a készüléket
- A légtömlő meghajlott. Távolítsa el a légtömlőben lévő hajlításokat vagy görbületeket,
- A szűrő elszorult. Cserélje ki a szűrőt.
- Nem jön gyógyszer. Adja hozzá a megfelelő mennyiségű gyógyszert a csészéhez.
- A kupak nincs megfelelően rögzítve. Illessze vissza a kupakot.

A gyógyszer túl lett töltve:

Adjon megfelelő mennyiségű gyógyszert a pohárba, csatlakoztassa a légkompresszort, és kapcsolja be a készüléket.

- A porlasztót kímolták, de nem szárították meg: Nyissa ki és zárja be többször a porlasztót, a cseppek eltűnnek.

MEGJEGYZÉS: Bármilyen más probléma esetén forduljon a kereskedőjéhez.

5. Ha a porlasztót tárolja, próbálja meg a következő környezeti tartományokban tartani:
 - 1) Hőmérséklet: -40°C - 55° G. 2) Relatív páratartalom: 95%.
 - 2) Légköri nyomás: 0,05MPa 0,106MPa.
6. Ha lehetséges, tárolja a porlasztót egy jól szellőző helyiségben.